


SmartSet®

MRI veya MRA'da Kontrast ve Yıkamanın yönetimi için
MR Uyumlu: MR Ortamı içerisinde kullanılmak üzere.
(Hazırlama Hacmi 6ml)

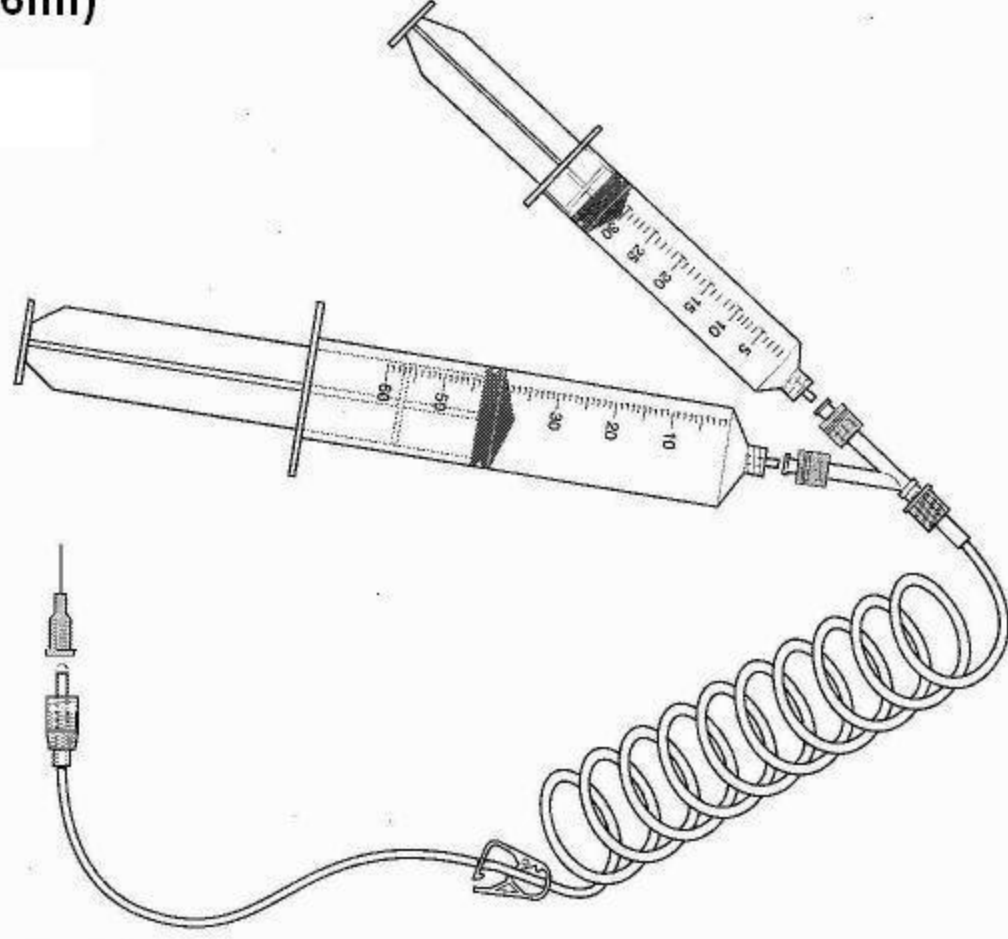

İklim Kontrollü, kuru ve serin bir ortamda muhafaza edin. Son kullanım tarihinden sonra kullanmayın

Sadece Rx: Doktor tavsiyesiyle kullanılır

CE 0470

STERİL EO ETOH sterilize



Tek kullanımlık



Talimatlar kutunun içerisinde



Son kullanım tarihi:

TopSpins, Inc.®

P.O. Box 7205 • Ann Arbor, MI • 48107-7205


Tel: 734-623-6400 Fax: 734-623-6401

Ücretsiz arama: 888-609-9956


CEpartner4U, Esdoornlaan 13,
3951DB Maarn. The Netherlands.
Tel: +31 (0)6.516.536.26

SmartSet® Kullanım Kılavuzu


Öncelikle SmartSet'i serum fizyolojik veya bir başka damardan verilen sıvı ile doldurun. kontrast sıvısının iv borusundan geçerek kol damarına gönderilmesi için 20cc serum fizyolojik kullanılması tavsiye edilir. Öncelikle serum fizyolojik doldurulmuş 30cc'lik bir şırınga vasıtasıyla SmartSet'i 6cc serum fizyolojik ile doldurabilirsiniz. iv'yi bir iki sefer 2cc serum fizyolojik enjekte ederek test edin. Şırıngada gadolinyum'un tüpten iletilmesini sağlayacak 20cc daha serum fizyolojik kalacaktır.

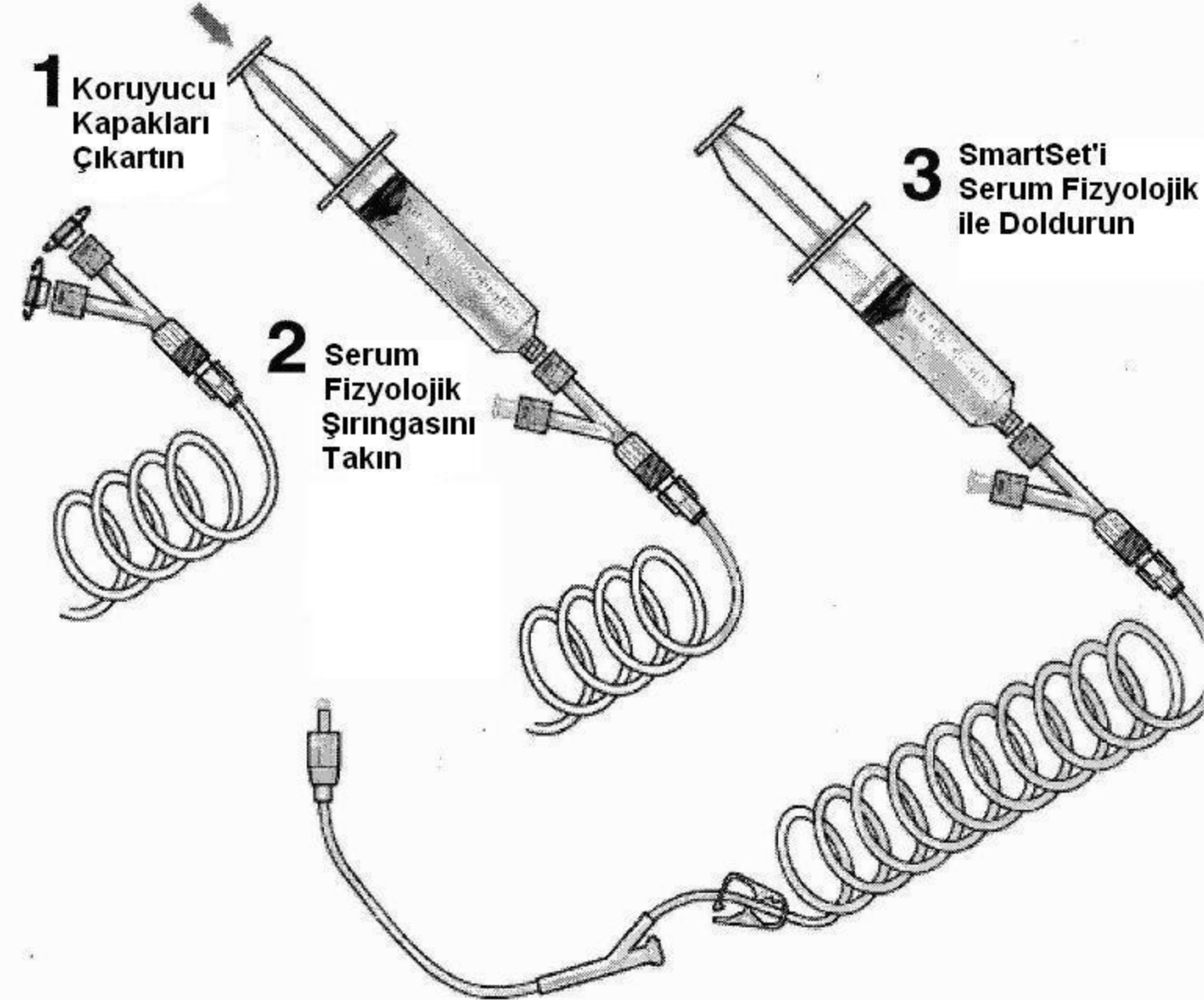


4 SmartSet'i damar içi katetere bağlayın (bastırarak tutturun)

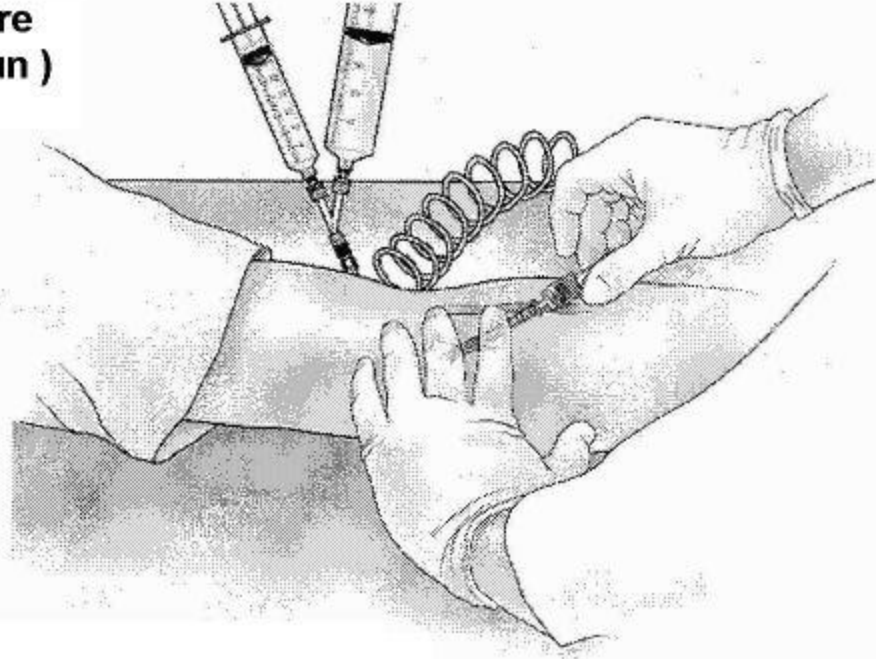

5 Luer-lock'ı ileri itip sağa doğru (saat yönünde) döndürerek SmartSet'i anjiyokatetere kilitleyin

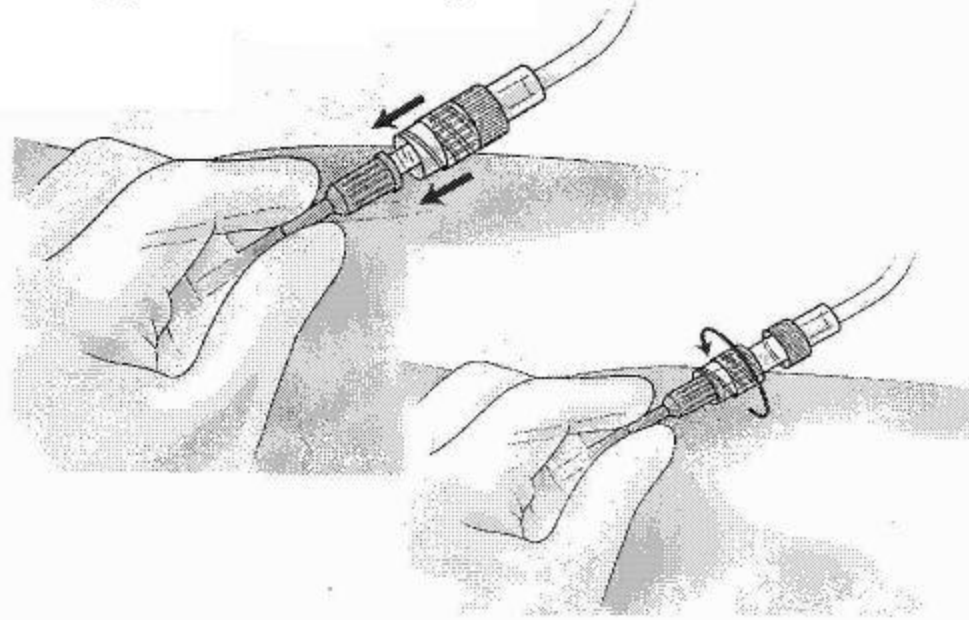

6 3-4 adet bant parçası ile bantlayarak kaza ile yerinden oynamasına engel olun

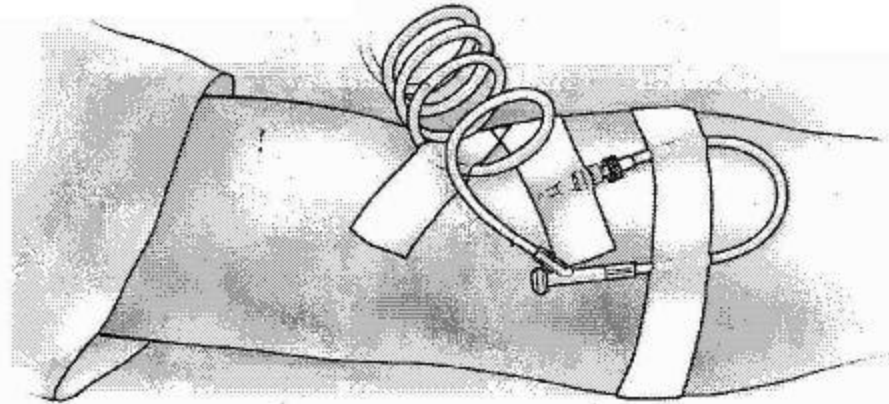


7 iv'yi test etmek için:

- * Serum fizyolojik enjekte edin
- * Hiçbir direnç olmamalı


Emme için:

- * Y düzeneğini çıkartın ve tüpün dip kısmına bir şırıngayı doğrudan bağlayın
- * Şırınganın pistonunu tüpte bir kırmızılık belirene kadar geri çekin
- * Bu işlemden sonra pıhtılaşp kalmaması için mutlaka tüpteki kanı serum fizyolojik ile yıkayın

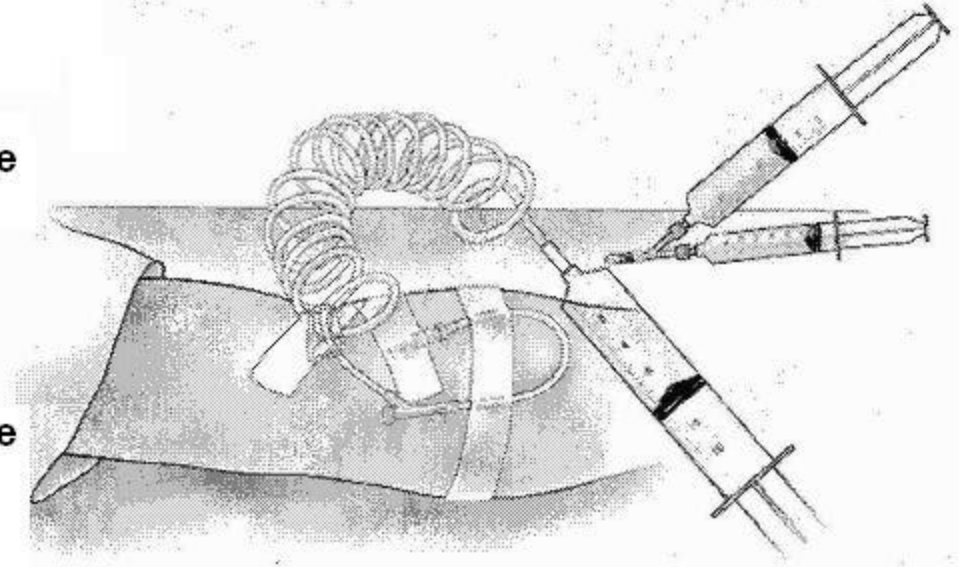

8 iv'yi çalıştırmak için:

- * Y düzeneğini çıkartın (kirlenmesini engellemek için erkek luer ucunu kapatın
- * iv tüpünü takın
- * İstmeden fazla sıvının kullanılmasına engel olmak için küçük iv torbaları (250cc) kullanın
- * Enjeksiyona hazır olunca Y düzeneğini geri takın

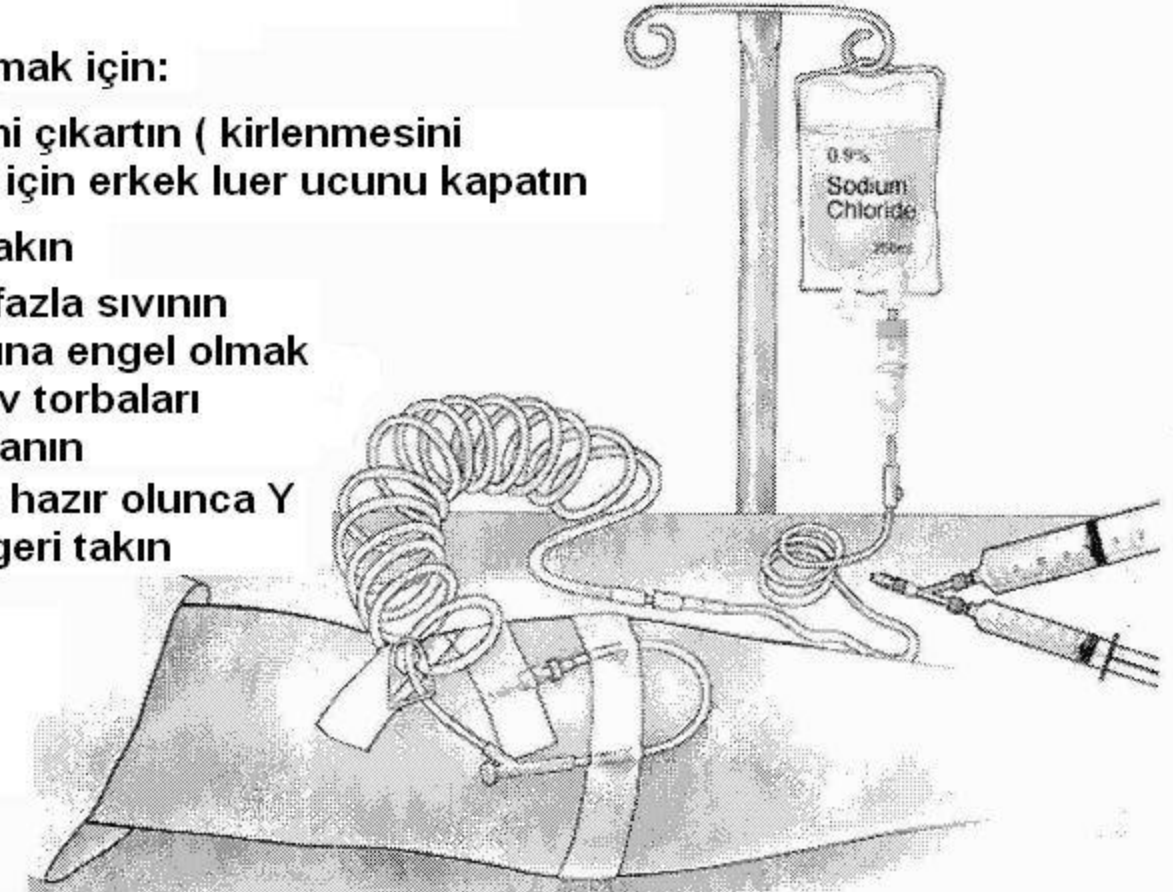

9 MRA bittikten sonra:

- * Çıkartmadan önce sıvının damlamaması için kelepçeyi sıkıştırın
- * Kanamayı engellemek için deliğin üzerine gazlı bez bantlayın
- * Bütün iğnelerin sharps container içerisinde imha edilmesini sağlayın